

microINR

Hurtigveiledning



1 Ta testchipen ut av folieposen. Hold i den gule delen og før chipen inn spalten på microINR meteret. Når chipen er korrekt satt inn, skal du kunne lese microINR i det gule feltet.



2 Chipen varmes opp i løpet av 60 sek. Når apparatet piper og en dråpe vises i displayet er microINR meteret Klar for analyse.



3 Stikk fingeren med lansetten. Sørg for å samle en stor rund bloddråpe. La dråpen komme i kontakt med midterste delen av chipen. Blodprøven suges nå inn i chipen ved hjelp av kapillærkreftene. Unngå at selve fingeren berører åpningen i chipen. Det kan medføre at den tettes igjen.



4 Apparatet piper når det er tilstrekkelig prøvemengde er suget inn (3µl). La fingeren bli værende i noen sekunder før du langsomt fører den bort.



5 Resultatet vises automatisk på displayet i løpet av et minutt. Ta chipen ut av apparatet etter at målingen er gjennomført.



*For mer informasjon,
vennligst les
pakningsvedlegget.*