

Customer information

Filtration · Testing · Chromatography · Bioanalysis
 Filtrieren · Testen · Chromatographie · Bioanalytik

Urinstrimmelanalyse:


Utføre urinundersøkelse med Medi-Test urinstrimmel

Ferske urinprøver må undersøkes innen 2 timer etter at de er tatt. Nedkjølte urinprøver må oppvarmes til romtemperatur før de undersøkes (15-30 °C).

Les denne veiledningen før undersøkelse utføres. Følg anvisningene nøye.



1.) Dypp strimmelen i urinprøven. Sørg for å fukte alle prøvefeltene. Ta opp teststrimmelen av urinen etter ca. 1 sekund. Stryk langsiden av teststrimmelen langs siden av beholderen for å fjerne overskytende urin.

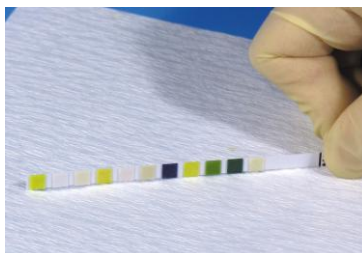

2.) Trykk langsiden av strimmelen kort (ca. 1 s) mot et tørkepapir for å fjerne overskytende urin.



3.) Les av resultatet etter 30-60 sekunder. Les av etter 60-120 sekunder for leukocytter. Noter resultatet.

Feilsøking

For lite prøvevolum	Trykk strimmelen forsiktig ned i beholderen. Strimmelen bøyer seg, og det er mulig å dyppe alle prøvefeltene i prøven.
Det renner av prøvefeltene	Fjern overskytende urin ved å berøre langsiden av prøvestrimmelen med tørkepapir.
Strimmelen "spretter"	Hold strimmelen slik at langsiden er vendt ned. Det hindrer effektivt at strimmelen beveger seg uønsket. Legg merke til at det kan forekomme en viss bevegelse pga. materialet som brukes for at strimmelen skal kunne brukes i små volum.

Viktig merknad

- Kontroller utløpsdatoen før bruk. Ikke bruk teststrimler etter utløpsdatoen.
 - Ikke ta ut flere teststrimler enn nødvendig, og lukk boksen umiddelbart etter bruk.
 - Ikke ta på teststrimlene.
 - Unngå å utsette strimlene for sollys og fuktighet.
 - Oppbevar boksen tørt ved 4 – 30 °C.
 - Fjern overskytende urin. Urin som blir værende mellom prøvefeltene kan føre til uklare resultater.
- For nærmere informasjon, vennligst les pakningsvedlegget.