

## Levering av Amplivox 250S lyddempet rom (boks) for hørselstest

Lydboksen leveres, om ikke annet er avtalt, til ytterdør eller lasterampe. Ved levering står den på en palle. Pallen inneholder to treskinner som legges på pallen som vist nedenfor.

Selve lydboksen har hjul slik at den kan trilles den fra pallen og videre inn på rommet hvor den skal stå. Vi anbefaler at minst to stødige/sterke personer sørger for forflytning og støtte av lydboksen fra pallen og inn.

På forhånd anbefaler vi at du sjekker at heis, dører o.l. har tilfredsstillende mål til at boksen kommer inn. Om det viser seg at døråpninger o.l. er for små, så kan denne boksen leveres i byggesett slik at den kan bæres inn i deler.

Ved levering bes du om å undersøke lydboksen for eventuelle transportskader. Eventuelle skader meldes direkte til sjåføren eller på mottaksdokumentet. I tillegg må leverandøren kontaktes samme dag.

