

Hurtigmanual for ichroma™ M3



Se bruksanvisningen

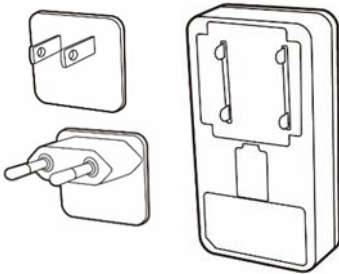
Kundeservice

Ved spørsmål om avleser, vennligst kontakt: **Boditech Med Incorporated**

Telefonnr.: +82 33 243 1400 / faksnr.: +82 33 243 9373

E-post: support@boditech.co.kr / Nettsted: www.boditech.co.kr

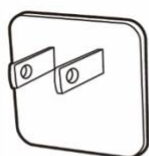
Pakke ut ichroma™ M3

ichroma™ M3	AC STØPSEL & AC Adapter	Kabel	Systemsjekk-kassett
			

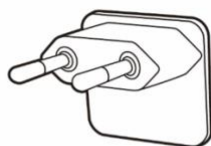
Starte ichroma™ M3

1. Strømtilførsel

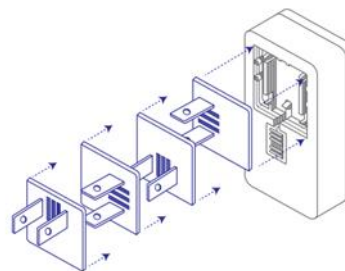
① Velge AC-STØPSEL



Plug A type



Plug C type

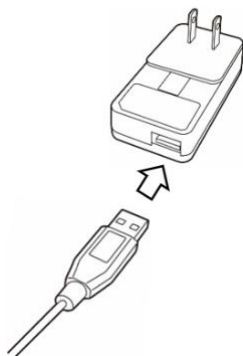


② Sett sammen AC-STØPSEL til adapter

ichroma™ M3 tilbyr AC-adapter med to AC-støpsel (vedlagte AC-støpsel, som oppfyller internasjonale standarder, er hovedtyper som brukes i USA og Europa.)

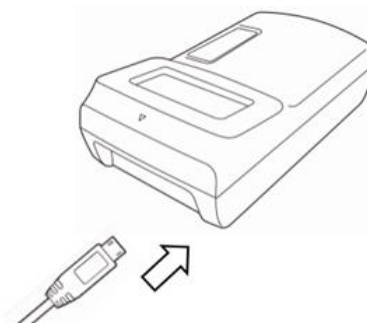
Koble riktig AC-støpsel til AC-adapteret. AC-støpsler kan byttes med andre støpsler. De kan konfigureres i 4 retninger.

③ Koble kabelen til adapteren



Koble USB A-pluggen til AC-adapteret. Deretter kobler du USB-adapteret til strømnettet.

④ Koble kabel til ichroma™ M3



Koble USB micro B-pluggen godt til strømporten på ichroma™ M3

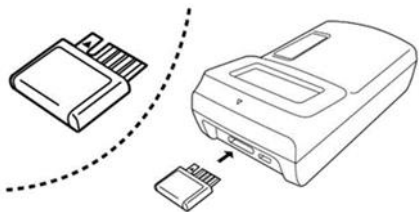
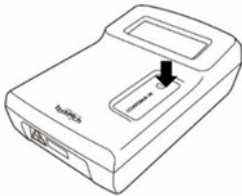
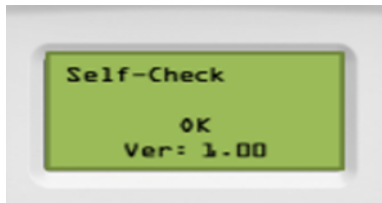
2. Selvkontroll og systemsjekktesting

Før målingen, vennligst sjekk ichroma™ M3 gjennom selvkontrolltesten og utfør systemsjekken ved å bruke systemsjekk-kassetten.

ichroma™ M3 leveres med en systemsjekk-kassett i pose. Pakk ut den medfølgende systemsjekk-kassetten og ta ut systemsjekk-kassetten og systemsjekk-ID-chip.

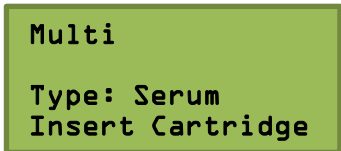
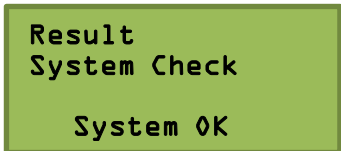
■ Selvsjekk

1) Før testen

Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3
Sett inn en systemsjekk-ID-chip i ID-chipsporet	Trykk på hovedknappen for å slå på	Utfør selvsjekktest
		

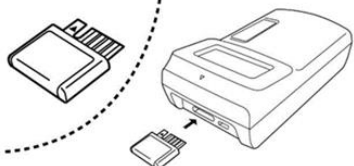
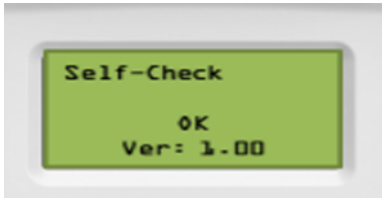
■ Testing av systemsjekk

1) Test prosedyre

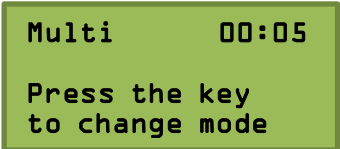
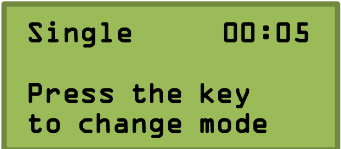
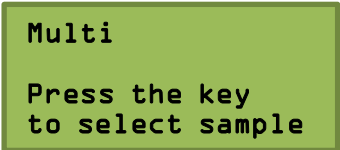
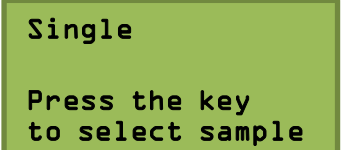
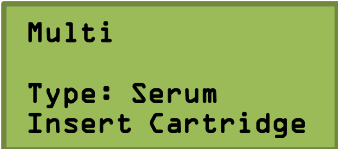
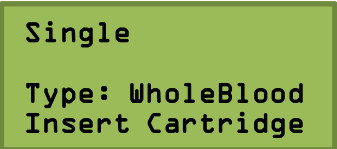
Modus	LCD-skjerm og betjening	Beskrivelse
Testing av system- sjekk		Trinn 1: Still inn testmodus "Systemsjekk" kan betjenes i multitestmodus.
		Trinn 2: Sett inn systemsjekk-kassetten. Sett inn systemsjekk-kassetten i kassettsporet
		Trinn 3: Bekreft resultatet Hvis det ikke er noen kritisk feil med den optiske modulen til ichroma™ M3, vil LCD-skjermen vise "System OK"-meldingen.

3. Pasient TEST

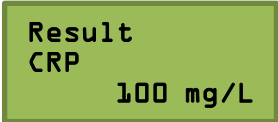
1) Før testen

Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3
Sett inn en ID-chip i ID-chipsporet 	Trykk på knappen for å slå på 	Utfør selvsjekktest 

2) Modusvalg og prøvetype

Nr.	Multimodus	Singelmodus
	Måleinnstillingsmodus vises. Vent 5 sekunder for å teste i multimodus.	
1		
	Trykk på knappen for å velge prøvetypen.	
2		
	Still inn prøvetypen du vil teste ved å trykke på hovedknappen.	
3		

3) Testprosedyre og resultatvisning <Eksempel: ichroma™ CRP test>

Nr.	Multimodus	Singelmodus
1		
	Punktering → Blodprøvetaking → Sett sammen med buffer → Bland godt → Kasser 2 dråper → Tilsett 2 dråper	
2	Sett inn kassetten etter 3 minutter.	Sett inn kassetten med en gang.
	Resultatet vises.	
3		

※ Se pakningsvedlegget til kassetten for detaljert testprosedyre.