

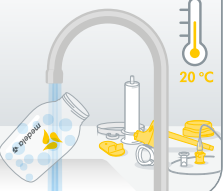
Hjelpebryst (SNS)

Trinnvis veiledning for rengjøring, montering og bruk av hjelpebrystet

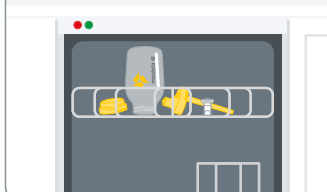


Slik rengjør du hjelpebrystet

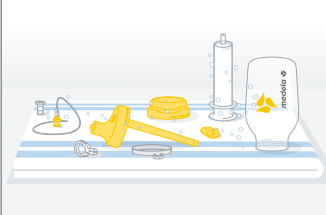
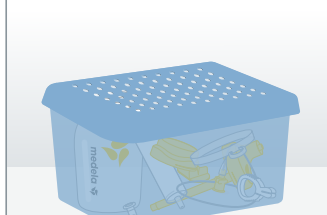
Før første gangs bruk og etter hver bruk

Skyll alle deler med kaldt vann (ca. 20 °C).	Rengjør alle deler med rikelig varmt såpevann (ca. 30 °C).	Skyll alle deler igjen med kaldt vann (ca. 20 °C).	Fyll rengjørings-sprøyten med varmt såpevann og skyll gjennom slangen 3 ganger.	Skyll gjennom slangen igjen 3 ganger med rent vann.	Til slutt, press luft gjennom slangen til innsiden er synlig tørr.
					

Før første gangs bruk og deretter én gang daglig

Rengjør beholderen, TwistLok-lokket, ventilen og lokket med enten kokende vann, i oppvaskmaskinen eller med Medela Quick Clean™-poser.	For rengjøring med kokende vann, dekk beholderen, TwistLok-lokket, ventilen og lokket med vann og kok i fem minutter.	For å rengjøre i oppvaskmaskin, plasser beholderen, TwistLok-lokket, ventilen og lokket på øvre skuff eller i bestikkurven.	Bruk Medela Quick Clean™-poser i samsvar med instruksjonene på posen til å rengjøre beholderen, TwistLok-lokket, ventilen og lokket i mikrobølgeovnen.
			

Tørking og oppbevaring

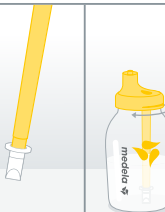
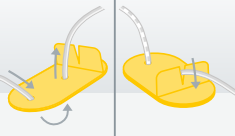
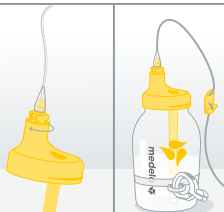
Tørk delene med en ren klut eller legg til tørk på et rent håndkle etter rengjøring.	Legg rene deler i et rent miljø. Delene skal ikke lagres i lufttette beholdere eller poser.
	

Ditt SNS-system

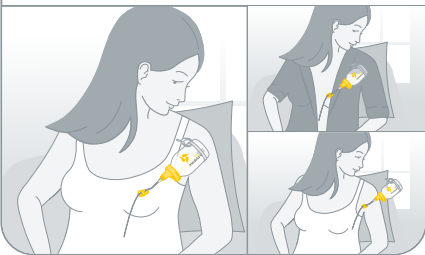
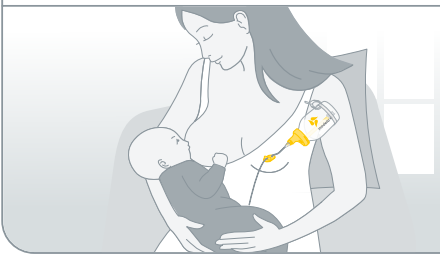
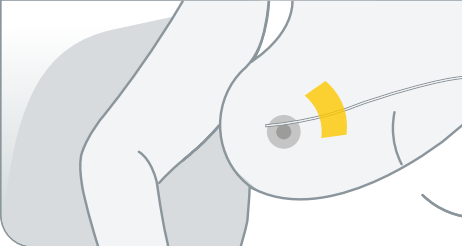
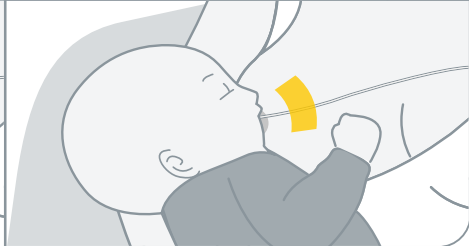
				
Beholder	Lokk	TwistLok-lokk	Slange	Rengjørings-sprøyte
				
Ring	Klips	Ventil	Klemme	

Slik monterer du hjelpebrystet

Vask hendene grundig med såpe og vann før bruk.

1 Fyll beholderen med ønsket mengde melk.	2 Fest klipsen til ringen. Plasser den monterte ringen og klipset rundt bunnen av beholderen.	3 Plasser ventilen på enden av TwistLok-lokket. Skru det monterte TwistLok-lokket på beholderen.	4 Før TwistLok-slangen gjennom klemmen og trykk slangen inn i klemmen slik at melken ikke kan strømme.	5 Skru den monterte slangen og klemmen fast på TwistLok-lokket.
				

Hvordan posisjonere og mate med hjelpebrystet

1 Fest hjelpebrystet sikkert og komfortabelt til BH-stroppen, toppen eller puten bak deg.	2 – Alternativ A Når du skal plassere slangen, må du først legge babyen til brystet. Når barnet har fått et godt sugetak, fører du forsiktig sonden ca. 1,5-2 cm inn i det øvre hjørnet av barnets munn.	
		
2 – Alternativ B Festetape kan også brukes til å plassere slangen om nødvendig. Tape først enden av slangen til brystet slik at den stikker ca. 0,5 cm forbi brystvorten ved enten klokken 10- eller klokken 2-posisjon.	Legg babyen til brystet på vanlig måte.	3 Løsne klemmen for å la melken strømme.
		

Kontakt ammespesialist eller helsepersonell hvis du er usikker på hvordan hjelpebrystet skal brukes.

Råd og tips

- For å øke eller redusere strømmingen, kan systemets høyde justeres.
- Det kan kreve et par forsøk før bruk av hjelpebrystet blir en enkel måte å mate på. Hvis du eller babyen opplever problemer eller blir opprørt, kan du prøve igjen ved neste mating.

Skann QR-koden for ytterligere informasjon om hjelpebrystet

