

Brukertips for Soehnle 8320 sammenleggbar spedbarnsvekt



- Batterikrav: 4 x 1,5 V AAA alkaliske. Det anbefales batterier med god kvalitet for lengre holdbarhet (ikke billig batterier).
- Bytte mellom kg og lbs: Når vekten er slått på, holder inn kg/lbs- knappen i minst 15 sekunder. Vekten vil da bytte veieenhet.
- Det anbefales på det sterkeste å bruke bæreveske (artikkel 5040.01.001) ved transport.
- Vekten åpnes forsiktig med begge hender og må ikke åpnes mer enn til vannrett stilling, da kan hengslene gå i stykker.
- Vekten må ligge på et flatt, hardt underlag når den brukes (ikke på teppe eller annet materiell som kan skli). Det er viktig at alle føttene ligger stødig og rett på underlaget, se til at alle føttene er godt plassert og i kontakt med underlaget. Føttene kan løsne og miste kontakt med veiecellene i vekten dersom de blir dratt langs et underlag.
- Av/på- knappen trykkes forsiktig inn, det skal kun være nødvendig med et lett trykk midt på knappen.



Helsestasjonsbutikken.no